


Anleitung zur vollständigen Deinstallation von Visomat® doubleComfort

1. Software über die Windows-Einstellungen deinstallieren


1. Öffne die Windows-Einstellungen:
 - a. Drücke die Windows-Taste und klicke auf das Zahnrad-Symbol oder
 - b. Drücke Windows + I auf der Tastatur.
2. Navigiere zu "Apps":
 - a. Klicke in den Einstellungen auf "Apps".
3. Finde "Visomat® doubleComfort" in der Liste:
 - a. Scrolle nach unten oder nutze die Suchleiste, um "Visomat® doubleComfort" zu finden.
4. Deinstallation starten:
 - a. Klicke auf die Anwendung und dann auf "Deinstallieren".
 - b. Bestätige den Vorgang mit "Ja" oder "OK", falls eine Meldung erscheint.
5. Folge den Anweisungen des Deinstallationsassistenten.
 - a. Falls eine Nachfrage kommt, ob du alle Daten entfernen möchtest, wähle "Ja".

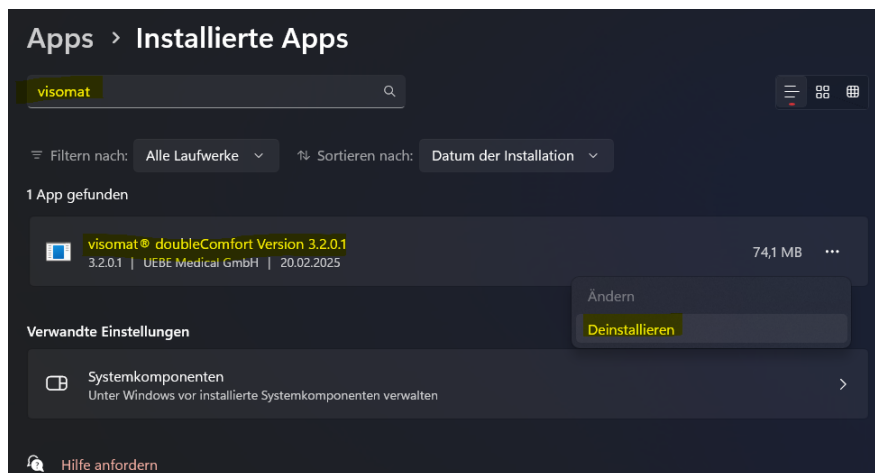

2. Den Treiber im Geräte-Manager entfernen


⚠ Der Visomat® doubleComfort muss während dieses Schrittes mit dem PC verbunden sein!

1. Öffne den Geräte-Manager:
 - a. Drücke Windows + X und wähle "Geräte-Manager" oder
 - b. Drücke Windows + R, gib devmgmt.msc ein und drücke Enter.
2. Suche nach dem Visomat® doubleComfort Gerät:
 - a. Erweitere die Kategorie "Anschlüsse (COM & LPT)" oder "USB-Geräte".
 - b. Suche nach einem Gerät mit dem Namen "Holtek USB To UART Brdige (COM3)" oder ähnlichem.
3. Deinstallation des Treibers:
 - a. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Gerät.
 - b. Wähle "Gerät deinstallieren".
 - c. Aktiviere die Option "Treibersoftware für dieses Gerät löschen" (falls verfügbar).
 - d. Bestätige mit "OK" oder "Ja".

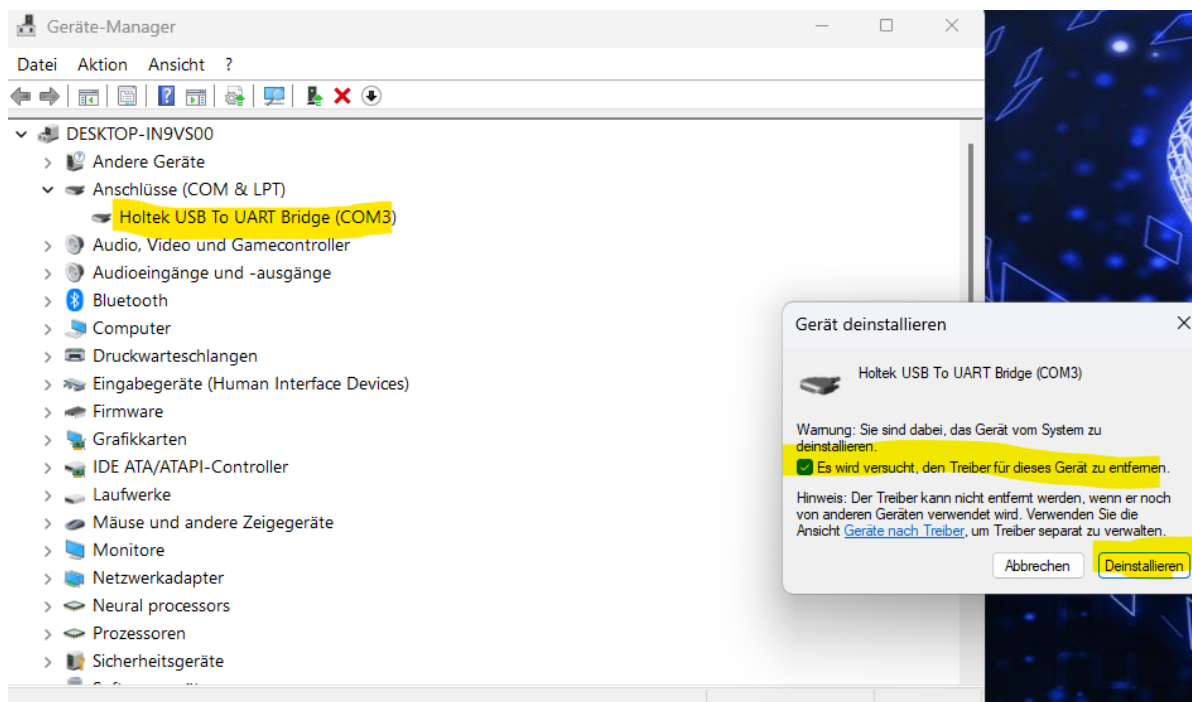

3. Treiber über die Windows-Einstellungen entfernen

1. Öffne erneut die Windows-Einstellungen (Windows + I).
2. Gehe zu "Apps" → "Installierte Apps".
3. Suche nach "Holtek USB Bridge Installer" oder ähnlichem.
4. Klicke auf "Deinstallieren" und folge den Anweisungen.

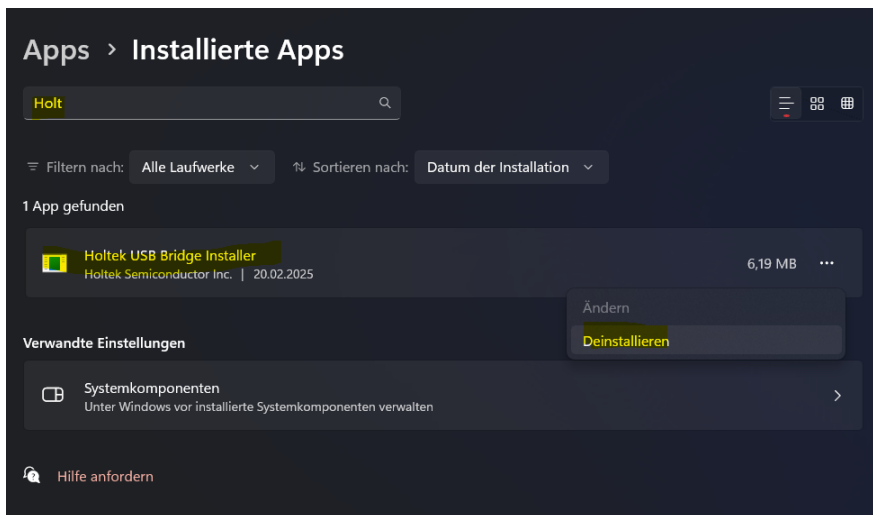

✅ Nach dem Neustart ist dein PC bereit für eine Neuinstallation der Software. Der Treiber wird bei der Installation automatisch installiert.