

visomat[®]

vision App



A	Registrierung	4
B	Datenübertragung	5
C	Bluetooth Koppelung	6
	1. Zuweisen des Blutdruckmessgerätes	7
	2. Zuweisen des Schrittzählers	8
	3. Zuweisen der Waage	8
	4. Koppelung fehlgeschlagen	8
D	Hauptfenster	9
	1. Bereich Blutdruck	10
	2. Bereich Schritte	10
	3. Bereich Gewicht	10
	4. Teilen Sie Ihre Daten	11
	5. Bearbeiten	11
	6. Benutzerverwaltung	12
	7. Einstellungen	12
	• Geräteverwaltung	13
	• Einheiten	13
	• Account	13
	• Über uns	13
E	Datenübersicht	14

visomat® vision App

Für die Datenübertragung auf Ihr mobiles Endgerät (Smartphone, Tablet), müssen Sie zuerst die dazugehörige visomat® vision App bei Ihren App Store für IOS und PlayStore für Android Endgeräte runter laden. Diese App ist gebührenfrei.

Nachdem Sie die visomat® vision App heruntergeladen haben, öffnen Sie die App.

Registrierung

Registrieren Sie sich einmalig mit Ihrer gewünschten E-Mail Adresse und einem Passwort dass sie nochmals bestätigen müssen. Bei der nächsten Nutzung, reicht dann die gewöhnliche Anmeldung mit E-Mail Adresse und Passwort.

Achtung: Wenn Sie bei der Registrierung das Häkchen bei „Passwort speichern“ setzen, müssen Sie bei nächster Anmeldung nicht erneut Benutzer und Passwort angeben.

Folgen Sie den Anweisungen der visomat® vision App weiter und tragen die erforderlichen Daten wie den Benutzernamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Größe, Gewicht, Maße ein. Bestätigen Sie diese immer mit „Weiter“. Dieser Vorgang ist einmalig und gehört zu der Registrierung.

Zum Schluss nochmals die Benutzereingaben mit „Speichern“ bestätigen.




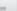
Sie können Ihre erfassten Werte, Blutdruck, Gewicht und Ihre Schritte per Bluetooth auf Ihr mobiles Endgerät übertragen. Damit die Übertragung erfolgreich verläuft muss Ihr mobiles Endgerät einen 4.0 Bluetooth haben. Ältere Versionen unterstützen die Geräte nicht.

Nun muss Ihr mobiles Endgerät mit Ihrem Blutdruckmessgerät, Waage oder dem Schrittzähler gekoppelt werden.


Hinweis: Die Bluetooth Koppelung mit Ihrem mobilem Endgerät und dem Blutdruckmessgerät, Waage und Schrittzähler ist einmalig und muss für weitere Datenübertragungen nicht mehr vorgenommen werden.

Bluetooth Koppelung

Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem mobilen Endgerät.

Um eine Koppelung mit dem Blutdruckmessgerät, der Waage und dem Schrittzähler zu erstellen, gehen Sie in die Einstellungen „“. Hier können Sie die Geräte mit dem „“ Zeichen hinzufügen.



Nun sollten Sie Ihr gewünschtes Gerät (Blutdruckmessgerät, Waage, Schrittzähler), aktivieren. Stellen Sie sicher das Ihr Gerät ausgeschaltet ist. Drücken und halten Sie dann die Taste mit diesem Symbol , beim Blutdruckmessgerät Benutzer 2, bei der Waage die Aktivierungs-Taste auf der Rückseite und beim Schrittzähler die MEM-Taste.




Während der Suche werden im Display abwechselnd diese Symbole angezeigt.

Bluetooth Koppelung

Wählen Sie dann die Bluetooth Verbindung aus. Jetzt werden Sie von der App gefragt, ob Sie Bluetooth aktivieren möchten. Falls Sie dies noch nicht gemacht haben, bitte stimmen Sie hier zu. Die App sucht dann automatisch nach Geräten, mit denen es sich koppeln kann.



Hat die App das Gerät gefunden, wählen Sie dieses aus, um die Geräte zu koppeln.

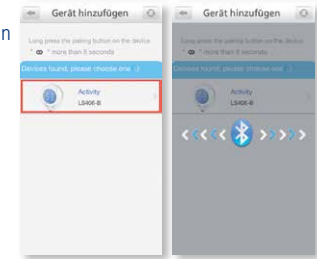


Bei erfolgreicher Koppelung sehen Sie im Display des Gerätes dieses Symbol:




1. Zuweisen des Blutdruckmessgerätes


Beim Verbinden mit dem visomat® vision cardio haben Sie die Möglichkeit, die vorhandenen zwei Benutzer-Speicher jeweils einem angelegten Benutzer zuzuweisen, wählen Sie dazu den passenden Benutzer aus.

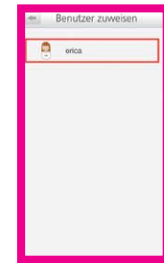

Bluetooth Koppelung

2. Zuweisen des Schrittzählers

Beim Verbinden mit visomat® vision step, weisen Sie den Schrittzähler zuerst einem Benutzer zu, dann sollten Sie Ihr Wochenziel eintragen und speichern Sie Ihre Daten mit dem Tippen auf das „“ Zeichen.

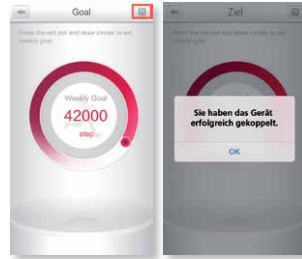

3. Zuweisen der Waage

Bei Verbinden mit visomat vision weigt reicht das Auswählen des Gerätes aus. Die Waage kann dann, nach dem Lernprozess die Daten automatisch dem richtigen Benutzer zuweisen. Daten, die die Waage nicht automatisch zuordnen konnte, finden Sie in der Datenübersicht. Diese sollten Sie den richtigen Benutzer zuordnen. Siehe S.14



Ab jetzt werden Ihre Daten immer automatisch übertragen, dazu sollten Sie allerdings immer die App sowie Bluetooth aktiviert haben. Falls keine Verbindung erstellt ist, werden die Daten Zeitweise gespeichert und erst dann übertragen, wenn wieder eine Verbindung vorhanden ist.

4. Koppelung fehlgeschlagen

Wenn keine Koppelung hergestellt werden konnte, wird auf dem Display E 1 (Zeit überschritten) angezeigt. Bitte wiederholen Sie in diesem Falls den Vorgang nochmals.

E 1

Hauptfenster

Hauptfenster



1. Bereich Blutdruck

- Ansicht ändern von Diagramm in Auflistung mit Kommentarfunktion mit „☰“.
- Möglichkeit der Wochenansicht, Monatsansicht oder Jahresansicht.
- Manuelle Eingabe der Blutdruckwerte möglich mit „+“.

2. Bereich Schritte

- Ansicht ändern von Diagramm in Auflistung mit Kommentarfunktion mit „☰“.
- Möglichkeit der Tagesansicht, Wochenansicht, Monatsansicht oder Jahresansicht.
- Manuelle Eingabe der Blutdruckwerte möglich mit „+“.
- Wochenziel setzen mit „🏆 Ziel“.

3. Bereich Gewicht

- Ansicht ändern von Diagramm in Auflistung mit Kommentarfunktion mit „☰“.
- Möglichkeit der Wochenansicht, Monatsansicht oder Jahresansicht.
- Manuelle Eingabe der von Gewicht und Taille möglich mit „+“.
- Zielgewicht mit Datum setzen mit „🏆 Ziel“.

4. Teilen Sie Ihre Daten

Sie können Ihre gespeicherten Werte, Blutdruck, Gewicht und Ihre Schritte per E-Mail versenden.

Dazu müssen Sie nur im Hauptfenster „📧 Teilen“ auswählen.

Falls Sie einzelne Werte nicht versenden wollen, wählen Sie diese aus, diese sind dann schwach hinterlegt zu sehen und werden dann nicht mehr versendet.

Nun können Sie entscheiden, wie Sie Ihre Daten versenden: per E-Mail, Twitter oder doch Facebook.

In den einzelnen Bereichen haben Sie die Möglichkeit, detaillierte Grafiken zu versenden.



5. Bearbeiten

Sie können hier die einzelnen Bereiche ausblenden oder in eine andere Reihenfolge setzen.


Wählen Sie dazu „🔧 Bearbeiten“ aus. Hier können Sie einfach durch setzen des Häkchens entscheiden, was eingeblendet bleiben soll. Mit dem Tippen und Halten des „☰“-Symbols können Sie die gewünschte Reihenfolge festlegen.



6. Benutzerverwaltung

Mit der visomat® vision App können Sie in einem Account auch mehrere Benutzer anlegen.

Hierzu wählen Sie „“ aus.

Mit dem „“ Zeichen legen Sie weitere Benutzer an, indem Sie die einzelnen Daten eingeben, wie auch schon bei der ersten Registrierung.



Benutzer bearbeiten / löschen

Wählen Sie dazu den gewünschten Benutzer durch tippen auf das Foto aus.

Benutzer wechseln

Wollen Sie den Benutzer wechseln, tippen Sie dann auf den Namen des gewünschten Benutzers.




7. Einstellungen


In den Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, Ihr Passwort, Ihren Account oder die Maßeinheiten zu ändern sowie weitere Geräte zu verwalten oder mehr über visomat® vision zur erfahren. Hier können Sie sich durch „Abmelden“ ausloggen und sich mit anderen Account anmelden. Gehen Sie dazu in die Einstellungen.

• Geräteverwaltung

Hier können Sie entweder gekoppelte Geräte löschen oder neue Geräte koppeln.

Zum Löschen wählen Sie das Gerät aus und tippen Sie auf „Gerät Löschen“.

Um neue Geräte zu koppeln, wählen Sie das „“ Zeichen aus und verfahren Sie weiter wie bei „Bluetooth Koppelung“ siehe S. APP-6.

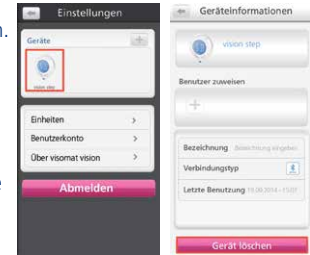

• Einheiten

Hier können Sie die Messeinheiten ändern.

• Account


Hier können Sie zwischen Passwort ändern oder Account ändern wählen.

Passwort ändern

In den einzelnen Fenstern können Sie Ihr altes Passwort mit einem neuen Passwort überschreiben.

Account bearbeiten

Neuen Account eintippen und ein Passwort dafür vergeben, ebenfalls mit Speichern bestätigen.

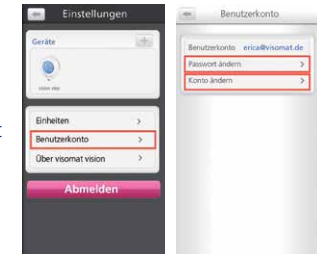

• Über uns

Hier haben Sie die Möglichkeit, auf die visomat®-Website zu gelangen und dort die Gebrauchsanleitung herunter zu laden oder uns einfach durch „Kontakt“ zu kontaktieren.

Datenübersicht

In dieser Übersicht sehen Sie alle Ihre einzelnen übertragenen Werte mit Uhrzeit, die automatisch durch die Bluetooth Verbindung gesendet wurden. Wenn einzelne Daten nicht zugeordnet werden konnten, können Sie es manuell durch Auswählen der Daten dem richtigen Benutzer zuordnen.

