

**visomat**<sup>®</sup>

vision App



visomat® und UEBE® sind international  
geschützte Warenzeichen der



UEBE Medical GmbH  
Zum Ottersberg 9  
97877 Wertheim  
Deutschland

Tel. Nr.: + 49 (0) 93 42 / 92 40 40  
Fax Nr.: + 49 (0) 93 42 / 92 40 80  
E-Mail: info@uebe.com  
Internet: www.uebe.com

Technische Änderungen vorbehalten.  
Nachdruck auch auszugsweise untersagt.  
© Copyright 2014 UEBE Medical GmbH

## Inhaltsverzeichnis

<b>A</b>	<b>Registrierung</b>	4
<b>B</b>	<b>Datenübertragung</b>	5
<b>C</b>	<b>Bluetooth Koppelung</b>	6
	1. Zuweisen des Blutdruckmessgerätes	7
	2. Zuweisen des Schrittzählers	8
	3. Zuweisen der Waage	8
	4. Koppelung fehlgeschlagen	8
<b>D</b>	<b>Hauptfenster</b>	9
	1. Bereich Blutdruck	10
	2. Bereich Schritte	10
	3. Bereich Gewicht	10
	4. Teilen Sie Ihre Daten	11
	5. Bearbeiten	11
	6. Benutzerverwaltung	12
	7. Einstellungen	12
	• Geräteverwaltung	13
	• Einheiten	13
	• Benutzerkonto	13
	• Über visomat® vision	13
<b>E</b>	<b>Datenübersicht</b>	14

### visomat® vision App

Für die Datenübertragung auf Ihr mobiles Endgerät (Smartphone, Tablet), müssen Sie zuerst die dazugehörige visomat® vision App in Ihrem App Store für iOS oder PlayStore für Android herunter laden. Diese App ist gebührenfrei.

Nachdem Sie die visomat® vision App heruntergeladen haben, öffnen Sie die App.

### Registrierung

Registrieren Sie sich einmalig mit Ihrer E-Mail Adresse und einem Passwort, das Sie nochmals bestätigen müssen. Bei der nächsten Nutzung genügt dann die gewöhnliche Anmeldung mit E-Mail-Adresse und Passwort.

Achtung: Wenn Sie bei der Registrierung das Häkchen bei „Passwort speichern“ setzen, müssen Sie bei der nächsten Anmeldung nicht erneut Benutzer und Passwort angeben.

Folgen Sie den Anweisungen der visomat® vision App weiter und tragen die erforderlichen Daten wie den Benutzernamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Größe, Gewicht, Maße ein. Bestätigen Sie diese immer mit „Weiter“. Dieser Vorgang ist einmalig und gehört zur Registrierung.

Zum Schluss nochmals die Benutzereingaben mit „Speichern“ bestätigen.





Sie können Ihre erfassten Werte Blutdruck, Gewicht und Schrittzahl per Bluetooth auf Ihr mobiles Endgerät übertragen. Damit die Übertragung erfolgreich verläuft, muss Ihr mobiles Endgerät den Bluetooth 4.0 Standard unterstützen. Ältere Bluetooth-Versionen werden von den visomat® vision Geräten nicht unterstützt.

Nun muss Ihr mobiles Endgerät mit Ihrem Blutdruckmessgerät, Waage oder dem Schrittzähler gekoppelt werden.


**Hinweis:** Die Bluetooth Koppelung mit Ihrem mobilem Endgerät und den visomat® vision Geräten ist einmalig und muss für weitere Datenübertragungen nicht mehr vorgenommen werden.


## Bluetooth Koppelung

Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem mobilen Endgerät.

Um eine Koppelung mit dem Blutdruckmessgerät, der Waage und dem Schrittzähler zu erstellen, gehen Sie in die Einstellungen „“. Hier können Sie die Geräte mit dem „“ Zeichen hinzufügen.



Nun sollten Sie Ihr gewünschtes Gerät (Blutdruckmessgerät, Waage, Schrittzähler), aktivieren. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist. Drücken und halten Sie dann die Taste mit dem Symbol , beim Blutdruckmessgerät Start/Stop-Taste Benutzer 2, bei der Waage die Aktivierungs-Taste auf der Rückseite und beim Schrittzähler die MEM-Taste.

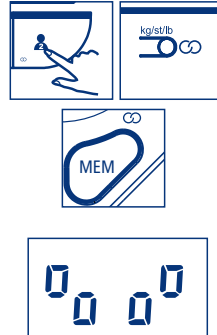


Während der Suche werden im Display abwechselnd diese Symbole angezeigt.



## Bluetooth Koppelung

Wählen Sie dann die Bluetooth Verbindung aus. Jetzt werden Sie von der App gefragt, ob Sie Bluetooth aktivieren möchten. Falls Sie dies noch nicht gemacht haben, stimmen Sie hier bitte zu. Die App sucht dann automatisch nach Geräten, mit denen sie sich koppeln kann.

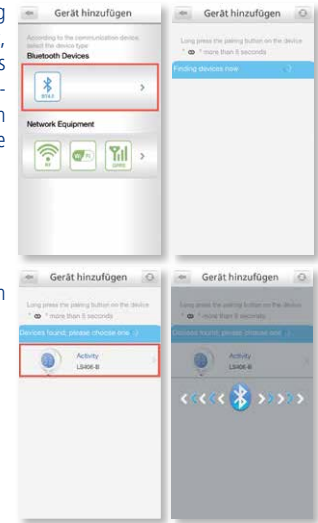


Hat die App das Gerät gefunden, wählen Sie dieses aus, um das Gerät zu koppeln.

Bei erfolgreicher Koppelung sehen Sie im Display des Gerätes dieses Symbol:




### 1. Zuweisen des Blutdruckmessgerätes


Beim Verbinden mit visomat® vision cardio haben Sie die Möglichkeit, die vorhandenen zwei Benutzer-Speicher jeweils einem angelegten Benutzer zuzuweisen. Wählen Sie dazu den passenden Benutzer aus.

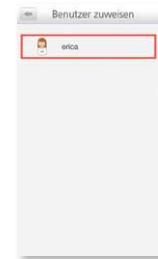

## Bluetooth Koppelung

### 2. Zuweisen des Schrittzählers

Beim Verbinden mit visomat® vision step weisen Sie dem Schrittzähler zuerst einem Benutzer zu, dann sollten Sie Ihr Wochenziel eintragen. Speichern Sie Ihre Daten durch Tippen auf das „“ Zeichen.

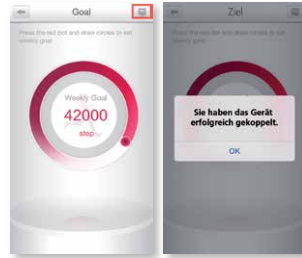

### 3. Zuweisen der Waage

Bei Verbinden mit visomat®vision weicht reicht das Auswählen des Gerätes aus. Die Waage kann dann nach dem Lernprozess die Daten automatisch dem richtigen Benutzer zuweisen. Daten, die die Waage nicht automatisch zuordnen konnte, finden Sie in der Datenübersicht. Diese sollten Sie den richtigen Benutzern manuell zuordnen. Siehe Seite App-14



Ab jetzt werden Ihre Daten immer automatisch übertragen, dazu sollten Sie allerdings immer die App sowie Bluetooth aktiviert haben. Falls keine Verbindung besteht, werden die Daten zeitweise gespeichert und erst dann übertragen, wenn wieder eine Verbindung vorhanden ist.

### 4. Koppelung fehlgeschlagen

Wenn keine Koppelung hergestellt werden konnte, wird auf dem Display E 1 (Zeit überschritten) angezeigt. Bitte wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang nochmals.



E 1

## Hauptfenster



### Hauptfenster






### 1. Bereich Blutdruck

- Wechsel zwischen Diagramm- und Tabellendarstellung zur Anzeige der Werte mit „“.
- Wechsel zwischen Wochen-, Monats- und Jahresansicht.
- Manuelle Eingabe der Blutdruckwerte möglich mit „“.

### 2. Bereich Schritte

- Wechsel zwischen Diagramm- und Tabellendarstellung zur Anzeige der Werte mit „“.
- Wechsel zwischen Tages- Wochen-, Monats- und Jahresansicht.
- Wochenziel setzen mit „ Ziel“.

### 3. Bereich Gewicht

- Wechsel zwischen Diagramm- und Tabellendarstellung zur Anzeige der Werte mit „“.
- Wechsel zwischen Wochen-, Monats- und Jahresansicht.
- Manuelle Eingabe der von Gewicht und Taille möglich mit „“.
- Zielgewicht mit Datum setzen mit „ Ziel“

### 4. Teilen Sie Ihre Daten

Sie können Ihre gespeicherten Werte Blutdruck, Gewicht und Schrittzahl per E-Mail versenden oder über Twitter und Facebook teilen.

Dazu müssen Sie nur im Hauptfenster „ Teilen“ auswählen.

Falls Sie einzelne Werte nicht versenden wollen, wählen Sie diese aus, diese sind dann schwach hinterlegt zu sehen und werden dann nicht mehr versendet.



Nun können Sie entscheiden, wie Sie Ihre Daten versenden: per E-Mail, Twitter oder Facebook.

In den einzelnen Bereichen haben Sie auch die Möglichkeit, detaillierte Grafiken zu versenden.



### 5. Bearbeiten

Sie können hier die einzelnen Bereiche ausblenden oder die Reihenfolge ändern.


Wählen Sie dazu „ Bearbeiten“ aus. Hier können Sie einfach durch Setzen des Häkchens entscheiden, welche Bereiche angezeigt werden sollen. Durch Tippen und Halten des „“-Symbols können Sie die gewünschte Reihenfolge festlegen.



## 6. Benutzerverwaltung

Mit der visomat® vision App können Sie in einem Account auch mehrere Benutzer anlegen.

Hierzu wählen Sie „“ aus.

Mit dem „“ Zeichen legen Sie weitere Benutzer an. Geben Sie die benutzerspezifischen Daten ein, wie bei der ersten Registrierung.



### Benutzer bearbeiten / löschen

Wählen Sie dazu den gewünschten Benutzer durch tippen auf das Foto aus.



### Benutzer wechseln

Wollen Sie den Benutzer wechseln, tippen Sie auf den Namen des gewünschten Benutzers.


## 7. Einstellungen


In den Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, Ihr Passwort, Ihren Account oder die Maßeinheiten zu ändern sowie weitere Geräte zu verwalten oder mehr über visomat® vision zu erfahren. Hier können Sie sich durch „Abmelden“ ausloggen und sich mit einem Account anmelden. Gehen Sie dazu in die Einstellungen.

### • Geräteverwaltung

Hier können Sie entweder gekoppelte Geräte löschen oder neue Geräte koppeln.

Zum Löschen wählen Sie das Gerät aus und tippen Sie auf „Gerät löschen“.

Um neue Geräte zu koppeln, wählen Sie das „“ Zeichen aus und verfahren Sie weiter wie bei „Bluetooth Koppelung“ siehe Seite App-6.

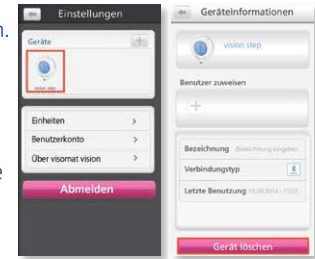

### • Einheiten

Hier können Sie die Messeinheiten ändern.

### • Benutzerkonto

#### Passwort ändern

Hier können Sie Ihr altes Passwort mit einem neuen Passwort überschreiben.

#### Konto ändern

Neuen Kontonamen und ein Passwort dafür vergeben, ebenfalls mit Speichern bestätigen.



### • Über visomat® vision

Hier haben Sie die Möglichkeit, auf die visomat®-Website zu gelangen und dort die Gebrauchsanleitung herunter zu laden oder uns zu kontaktieren.